

# STANDARD™ F

Test disponibles para Analizadores Standard F



## Test Standard F

CATEGORÍA	CÓDIGO	TEST	TIPO DE MUESTRA	VOLUMEN DE MUESTRA	TIEMPO DE ESPERA	TIPO	UNIDADES	
Enfermedades respiratorias	10COV30D	COVID-19 Ag FIA *	Hisopado nasofaríngeo	-	30 min	CL	25	
	09COV50G	COVID-19 IgM/IgG Combo FIA **	Sangre entera / suero / plasma	10 µl	15 min	CL	40	
	10INF10D	Influenza A / B FIA	Hisopado nasal	-	1,5 - 10 min	CL	25	
	10ADE10D	Adeno Respiratorio Ag FIA	Hisopado nasal y nasofaríngeo	-	15 min	CL	25	
	10RSV10D	RSV Ag FIA	Hisopado nasofaríngeo	-	5 -15 min	CL	25	
	10STR10D	Strep A Ag FIA	Hisopado de garganta	100 µl	5 min	CL	25	
	10LEG10D	Legionella Ag FIA	Orina	-	5 -15 min	CL	25	
	10SPN10D	S. pneumoniae Ag FIA	Orina	100 µl	5 -10 min	CL	25	
	10DEN10D	Dengue NS1 Ag FIA	Sangre entera / suero / plasma	100 µl	15 min	CL	25	
	10DEN20D	Dengue IgM/IgG FIA	Sangre entera / suero / plasma	10 µl	15 min	CL	20	
Marcadores cardíacos	10CKM10I3	CK-MB FIA	Sangre entera / plasma	100 µl	15 min	CN	20	
	10NTP10B	NT-proBNP FIA	Sangre entera (EDTA) / Suero	100 µl	15 min	CN	20	
	10HSC10B	hs-CRP	Sangre entera / suero / plasma	5 µl	3 min	CN	20	
	10DD10I3	D-dimer FIA	Sangre entera / plasma	10 µl	3 min	CN	20	
	10TNI10B	TnI FIA	Sangre entera / plasma	100 µl	15 min	CN	20	
Inflamación	10PCT20B	PCT FIA	Sangre entera / suero / plasma	100 µl	15 min	CN	20	
Enfermedades crónicas	10A1C10B	HbA1c	Sangre entera	5 µl	3 min	CN	20	
	10UAL10B	U-Albumin FIA	Orina	3 µl	5 min	CN	20	
Hormonales	10BHC10B	B-hCG FIA	Sangre entera / plasma	100 µl	10 min (suero) 15 min (sangre entera)	CN	20	
	10T410B	T4	Suero	50µl	15 min	CN	20	
	10FT410B	FT4	Suero	50µl	15 min	CN	20	
	10TSH10B	TSH	Suero / plasma	100µl	15 min	CN	20	
	10LH10B	LH	Sangre entera / suero / plasma	20µl	15 min	CN	20	
	Marcadores Tumorales	10IF010B	iFOB	Heces	-	5 min	CN	20
	Tuberculosis	10TBFI0E	TB-Feron FIA (IFN-gamma)	Plasma	100µl	15 min	CN	30

CN: Cuantitativo / CL: Cualitativo (Cut Off Index)



### \*STANDARD F COVID-19 Ag FIA

- Tiempo de espera: dentro de los 30 mins
- Tipo de muestra: Hisopado nasofaríngeo
- T° de almacenamiento: 2-30°C/36-86°F
- Inmunoensayo Fluorescente (Europio)
- Mayor sensibilidad que un Test rápido
- Equipo necesario: F2400, F200 o F100
- Presentación: 25 Tests/kit

### \*\*STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA

- Tiempo de espera: dentro de los 15 mins
- Tipo de muestra: Sangre entera / Suero / Plasma
- T° de almacenamiento: 2-30°C/36-86°F
- Inmunoensayo Fluorescente (Europio)
- Mayor sensibilidad que un Test rápido
- Equipo necesario: F2400, F200 o F100
- Presentación: 40 Tests/kit

\*Consulte disponibilidad de ambos kits.

## Ventajas del STANDARD F



### 1. Simple y fácil de utilizar

Plataforma de prueba de flujo lateral familiarizado con opción de incubación y lectura / solo lectura

### 2. Inmunoensayo fluorescente basado en Europio

El cambio a un Stoke de mayor amplitud permite la detección de fluorescencia sensible y de picos de emisión Multiplex.

### 3. Acceso aleatorio a través del sistema de código de barras 2D.

Reconocimiento automático del dispositivo de prueba (Ensayo, N° de lote, número de serie, información de codificación, fecha de caducidad)

### 4. Control de calidad interno

Control de calidad en ensayo específico y en dispositivo de prueba.

### 5. Almacenamiento

Los dispositivos de prueba pueden almacenarse a temperatura ambiente (2 - 30 °C)

### 6. Conocimiento de ID

STANDARD F imprime el ID del paciente, escrito en el dispositivo, lo que permite disminuir errores pre y post analíticos.

## Procedimiento de uso

**Modo TEST STANDARD:** Procedimiento automatizado para 1 sola prueba



1: Inserte la tira para iniciar el procesamiento de prueba.



2: Aplique la muestra en la tira.



3: Lea el resultado cuando haya finalizado. Los tiempos de incubación se encuentran en el inserto.

**Modo LECTURA** (solamente para artículos de prueba cualitativa): Procedimiento de alto rendimiento para múltiples pruebas



1: Aplique la muestra en una tira.



2: Deje la tira fuera del analizador. Espere el tiempo requerido en el inserto.



3: Inserte la tira en el analizador. La lectura demorará menos de 1 minuto.

**Oficina y Depósito:** Vera 575 (Capital Federal)  
**Tel/FAX:** (+54 11) 4858-0636 (Rotativas)  
info@montebio.com.ar | [www.montebio.com.ar](http://www.montebio.com.ar)